


5. 체중오차 보정방법


무게가 실제보다 적게 나올 경우

1. 얇은 핀을 사용하여, 설정버튼을 약10초간 누르면, 터치바가 내려와, 디스플레이 옆에 위치 합니다.

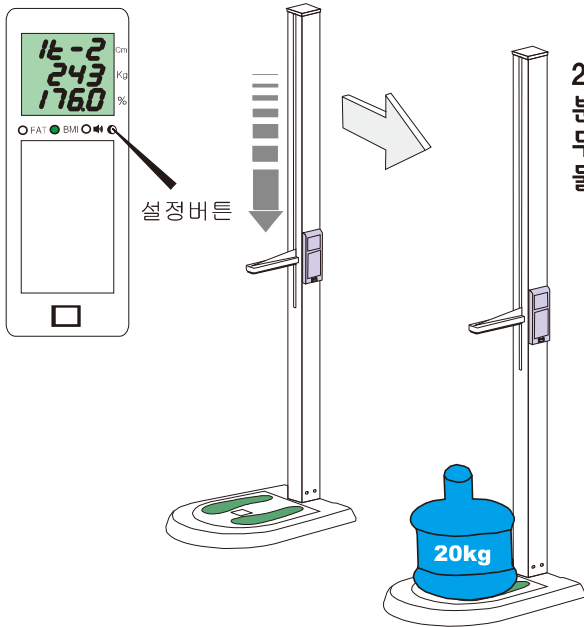

2. 분동 (예, 20kg), 또는 무게를 알고있는 물체를 올려 놓습니다.

3. 정확한 무게값이 표시될때까지, 터치바의 터치면을 여러번 누르거나 계속 누릅니다.

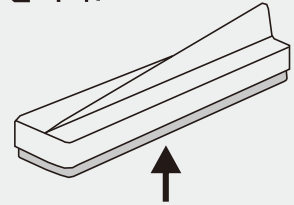


< uP 설정 >

16-2	Cm
19.5 ⇒ 20.0	Kg
17.60	%

여기에 나오는 숫자는 수치의 변화만 보여줄뿐 아무 의미가 없습니다.

○ FAT ● BMI ○ ○


4. 설정버튼을 3초간 누르면 보정이 완료 됩니다.

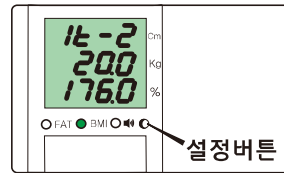

무게가 실제보다 많이 나올 경우

1. 얇은 핀을 사용하여, 설정버튼을 약10초간 누르면, 터치바가 내려와 디스플레이 옆에 위치 합니다.
2. 분동 (예, 20kg), 또는 무게를 알고있는 물체를 올려 놓습니다.
3. 설정버튼을 한번더 눌러 DOWN (dN) 설정으로 변경 합니다.

4. 정확한 무게값이 표시될때까지, 터치바의 터치면을 여러번 누르거나 계속 누릅니다.

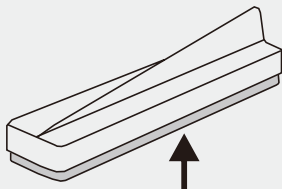

< dN 설정 >

16-2	Cm
21.5 ⇒ 20.0	Kg
17.60	%

여기에 나오는 숫자는 수치의 변화만 보여줄뿐 아무 의미가 없습니다.

○ FAT ● BMI ○ ○

5. 설정버튼을 3초간 누르면 보정이 완료 됩니다.

